

PoloDent PoloTaper Shaping-file har adskillige tilspidsninger, der sikrer fleksibilitet og skærer tandbenet i specifikke kanalområder med større effektivitet, mens de samtidig reducerer risikoen for overklargøring.

PoloTaper Finishing-filerne sikrer korrekt apikal tilpasning til de matchende PoloTaper-guttaperkaspidser.

- Identificer materialesammensætningen for alle eksisterende restaureringer, der skal fjernes eller penetreres for at få adgang. Vælg det relevante instrument til opgaven for at få adgang gennem tanden.
- Brug endodontisk intrakanalsmøremiddel og små håndfile ved manuel inspektion og sikring af kanaler.
- Brug NaOCl ved mekanisk forformning eller formning af kanaler.
- Lav glidesti ved hjælp af det korrekte filsystem.
- Brug PoloTaper SX-file i en eller flere omgange for at udvide glidestien.
- Brug PoloTaper SX-file til at flytte det koronale aspekt af en kanal væk fra en ekstern rodkonkavitet, eliminere trekanten af dentin eller producere mere form efter behov.
- Skyl, gentag med en håndfil, og skyl igen, når hver roterende fil er fjernet.
- Rengør og efterse regelmæssigt rillerne på PoloTapers.
- Brug PoloTaper-file i områder af kanalen, der har en bekræftet, glat og reproducerbar glidesti.
- Brug PoloTaper-file i en bevidst børstebevægelse på den udadgående bevægelse for at klargøre kanaler, der udviser uregelmæssige tværsnit, mere optimalt og for at lette bevægelsen af apikale file.
- Brug en PoloTaper-fil i en eller flere omgange for at opnå en sikker længde.
- Brug formfilerne (S1, S2 og SX) med en børstebevægelse. Børstebevægelse.
- Brug Finishing-filerne (F1-F5) i en "ind- og ud"-bevægelse (ikke børstning).
- Træk filerne tilbage, når arbejdslængden er fastlagt.




Børst, følg og form til længden

S1 og S2



Følg, børst og afslut til længden

F1 og F2

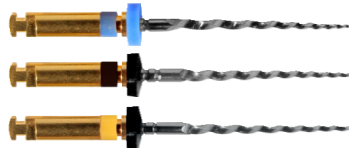

Følg, børst og afslut til længden

F3, F4 og F5

Forholdsregler

1. Efterse filen for skader eller tegn før hver brug. Kassér beskadigede file.
2. Håndstykkerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
3. Sæt filen helt ind i patronmekanismen for at eliminere ikke-koncentrisk drift.

Ansvarsbegrænsning

PoloTaper-filer er under ingen omstændigheder egnede til alle patienter, så der skal altid udvises professionel dømmekraft og diskretion. PoloTaper-file må kun anvendes af autoriserede tandlæger med passende klinisk erfaring og uddannelse. Der skal altid udvises forsigtighed. De behandlingsmuligheder og -teknikker, der er beskrevet i denne indlægseddell, er kun vejledende og er muligvis ikke egnede til alle patienter. Tandlæger skal anvende passende kraft ved brug af PoloTaper-file. Overdreven kraft kan forårsage for tidligt slid på instrumenterne. Brug din professionelle dømmekraft.

vers.63-2111.01



Polo MB Oisterwijk BV

Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, Holland

SS White Burs, Inc.

1145 Towbin Ave
Lakewood, NJ 08701, USA

EC

REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53,
1030 Bruxelles, Belgium

Anbefaling 250 o/min. Sterilisér før brug.
Kan ikke returneres, hvis forseglingen er brudt.

