

TRIOS 6

Rengøring og desinfektion af MOVE, håndstykke, spidser og scannerlinse.

Det er vigtigt at adskille rengøring af spids, linse og scannerens overflader.

Scanneroverflader (display, håndstykke osv.):

Tør af med **Cavi Wipes*** overfladedesinfektionsservietter.

Skærmen er ikke fugttæt, så tør den hurtigt af med en tør, blød klud.

Rengøring af scannerspids:




- **Manuel rengøring** med mildt opvaskemiddel, vand og blød klud.

Blød børste kan anvendes på plast. Må ikke rengøres i termodesinfektor

- Skyl og tør efter med en blød klud. Glasset er følsomt over for ridser, hvilket vil forringe scanningsresultatet. Spidsen forventes at holde til cirka 100 autoklaveringer.

Autoklaving: Spidsen skal vaskes, skylles, tørres, pakkes i en forseglet, lufttæt, steril pose og køres med programmet 121/134 grader.

Rengøring af beskyttelsesspids

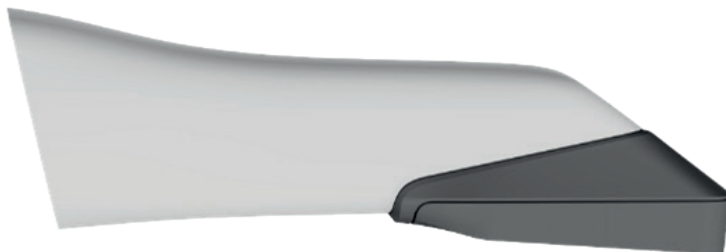

Beskyttelsesspidsen kan kun overfladedesinficeres! Den kan ikke bruges i en vaske- og desinfektionsmaskine eller autoklave. Når håndstykket desinficeres, skal beskyttelsesspidsen udskiftes.

Rengøring af scannerlinse:

Desinficer kun når det er nødvendigt med Cavi Wipes*, og det er vigtigt at tørre straks efter med en blød klud, så væsken fra Cavi Wipes ikke fordamper fra linsen.

Dette kan forårsage en hinde på scannerlinsen, der forringer scannerresultatet. Hvis der opstår mere alvorlige pletter på linsen, kan 70% udenatureret ethanol bruges til forsigtigt at tørre linsen af. Sælges som M-alkohol eller U-alkohol på Apoteket.

Linsen er et optisk instrument, der er meget følsomt over for ridser. Rør aldrig ved linsen med fingrene.

***Bløde kluder** kan bestilles fra Unident Danmark med varenummer:

7020 Curi Med. 100 stk/pakke.

***Cavi vådservietter** varenummer: 4731160 160 stk/pakke.

Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse med 3Shapes anbefalinger og garantibetingelser.