

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



LEÍRÁS: Az ASPIJECT® Passive egy önszívó fogászati ampullás fecskendő helyi érzéstelenítéshez.

KOMPATIBILITÁS: Az ASPIJECT® Passive hagyományos fogászati tűvel és hagyományos fogászati ampullával használható a következők szerint:

REF	Tűcsatlakozó	Ampulla
2050, 2051, 2033	M6	1.8 ml
2055, 2056, 2057	7/32"	1.8 ml
2027, 2060, 2061, 2065	7/32"	2.2 ml



Használjon műanyag csatlakozós fogászati tűket.

Kerülje a fém csatlakozók használatát, mert a fémforgács lerakódásokat okozhat a menetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Szájüregben történő infiltrációs és vezetéssel érzéstelenítéshez.

FELHASZNÁLÓI PROFIL: Lokális fogászati injekciók beadására feljogosított és képzett fogászati szakemberek használhatják.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Elsőként csavarja a hagyományos fogászati tűt a fecskendőre, 1. ábra.
2. Az ampulla hátuljánál fogva helyezze be az ampullát, 2. ábra.
3. Nyomja előre az ampullát, hogy illeszkedjen a tűhöz, 3. ábra.
4. Passzív aspiráció: Finoman nyomja meg a dugattyút és azonnal engedje fel. Az ampulla gumijának torzulása a szíváshoz szükséges negatív nyomást hoz létre az ampullában. Tudnia kell, hogy az önszívó tulajdonság az ampulla gumijának rugalmasságán alapszik. Emiatt előfordulhat, hogy egyes ampullák nem alkalmasak passzív aspirációra, 4. ábra.
5. Az injekció beadását követően nyomja vissza az ampullát, hogy leválassza a tűről. Távolítsa el az ampullát, 5. ábra.

TISZTÍTÁS: Tisztítsa fogászati mosogató- és fertőtlenítőgépből univerzális programon.

STERILIZÁLÁS: Az ASPIJECT® Passive nem steril formában kerül forgalomba, ezért az első használat előtt sterilizálni kell. Sterilizálja nedves hővel (autoklávban) 134°C-on 3 percig.

TÁROLÁS: ASzáraz helyen, újrászennyeződéstől védve tartandó.

ÁRTALMATLANÍTÁS: Ártalmatlanítsa az ASPIJECT® Passive készüléket, ha a készülék sérült vagy látható kopásnyomok vannak rajta. Az utolsó használat után az ASPIJECT® Passive készüléket tiszta állapotban helyezze egy újrahasznosító konténerbe.

JÓTÁLLÁS: Az ASPIJECT® Passive készülékre 5 év jótállás van. A nem megfelelő használatból vagy helytelen kezeléssel eredő károokra nem terjed ki a garancia.

TERMÉK

ÉLETARTAMA: 5 év.