

Denne brugsanvisning henviser til følgende artikler:

Blandingsblokke Slidstærkt specialpapir	60 ark	40 ark	25 ark	35 ark
REF	80800	80801	80802	80803
Størrelse	universal (u)	lille (a)	medium (b)	stor (c)
Mål	7,0 x 8,0 cm	3,5 x 4,5 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Emballeringsenhed	10 blokke	10 blokke	10 blokke	5 blokke




Skridsikre blandingsblokke Skridsikker underside	60 ark	25 ark	35 ark
REF	80820	80822	80823
Størrelse	universal (u)	medium (b)	stor (c)
Mål	7,0 x 8,0 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Emballeringsenhed	10 blokke	10 blokke	5 blokke

Pergamentblandingsblokke Slidstærkt specialpapir	75 ark	75 ark	75 ark
REF	80950	80951	80952
Størrelse	lille (d)	medium (e)	stor (f)
Mål	4,0 x 4,0 cm	7,0 x 10,0 cm	14,0 x 20,0 cm
Emballeringsenhed	10 blokke	10 blokke	10 blokke

Skridsikre folieblokke Skridsikker underside	100 ark	100 ark
REF	80830	80834
Størrelse	universal (u)	stor (g)
Mål	7,0 x 8,0 cm	8,0 x 14,0 cm
Emballeringsenhed	1 blok	1 blok

Blandingsblokke Mat overflade	40 ark
REF	80811
Størrelse	lille (a)
Mål	3,5 x 4,5 cm
Emballeringsenhed	12 blokke

a

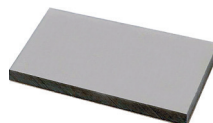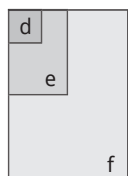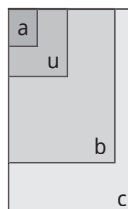



REF 80812, 80826, 80829, 80840, 80845, 80870, 80871, 80872, 80873, 80874, 80875, 80876, 80877, 80901, 80902, 80903, 80930, 80931, 80932, 80939, 80940, 80941, 80942, 80943, 80944, 80945, 80946, 80955, 80956, 80960, 80961, 80962, 80970, 80971, 80972, 80973, 80974, 80975, 81800, 81802, 81803

133645, 144114, 144115, 147667, 147684, 147685, 185744, 185968, 185969, 209927, 239720, 2820045, 2820050, 2820055, 2820110, 2820220, 2820245, 2S00440, 2S00441, 2S00443, 496531, 496542, 498044, 498099, 498102, 500209, 500323, 500334, 5-639, 5-640, 5-641, 5-642, 5-698, 5-699, 704180, 704188, 704203, 704207, 704212, 704215, 7042218, 7042219, 7071, 7072, 7073, 7074, 90485, 90490, CTB015, CTC050, CTC051, CTD021, CTM051, CTM052, CTP011, PFU105, PSP18050


Ref. nr. kan afvige fra forhandlerens ref. nr. Brug forhandlerens ref. nr. ved genbestilling.



- 1** Anvendelse af de enkelte komponenter: Påfør komponenterne på den øverste del af blandeklodsens i henhold til producentens anvisninger.
- 2** Blanding af komponenterne: Bland komponenterne i henhold til producentens anvisninger, indtil der opnås en homogen masse.

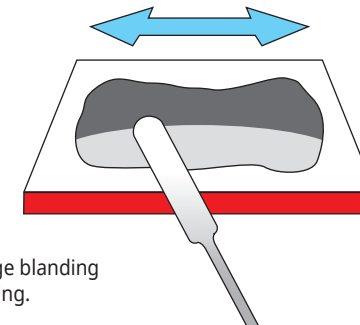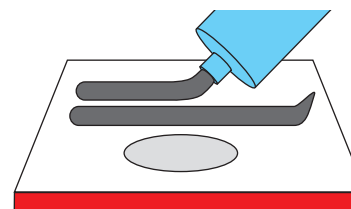

- 3** Fjernelse af blandingen: Du kan nu fjerne den færdige blanding fra blandeklodsens med henblik på videre forarbejdning.

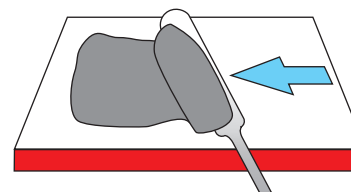

- 4** Bortskaffelse: Riv det brugte ark af blokken, og smid det i skraldespanden.

Status: 1. september 2022

Erklæret formål

Blandingsblokkene bruges til manuel blanding af forskellige komponenter i tandcement, kompositter eller aftryksmateriale i tandlægepraksis. De enkelte sider af blandingspuden til engangsbrug tjener som en overflade, hvorpå de enkelte komponenter påføres. Efter blanding på blandebløkken kan materialet anvendes direkte fra blandebløkken.

Data om ydeevne


Produktets engangsbrug reducerer risikoen for krydskontaminering mellem forskellige anvendelser eller patienter sammenlignet med produkter til flere formål (f.eks. aluminium- eller glasplader) og sparer tid (rengøring af produkter til flere formål) i tandlægepraksis.

Den glatte, vand- og fedtafvisende overflade forhindrer, at komponenterne trækkes ind i blandingsblokken. De mange størrelser sikrer høj stabilitet.

Bemærkninger om sikker anvendelse af produktet*

- Det medicinske udstyr må kun anvendes af (uddannet) tandlægepersonale.
- Bær handsker under brug.
- Brug et nyt ark af blandingspuden til hver brug.
- Bortskaf det brugte ark efter hver brug.
- Blandingspuderne er produkter til engangsbrug. Hvis produktet (enkelt ark) anvendes mere end én gang, kan der forekomme krydskontaminering og blanding af forskellige tandcementer, kompositter eller aftryksmaterialer. Det blandede materiales egenskaber kan ikke garanteres i dette tilfælde.
- Brug ikke et beskadiget eller forurenet ark.
- Opbevar produktet på et mørkt og tørt sted mellem 5 og 35 °C.

Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i dit land.

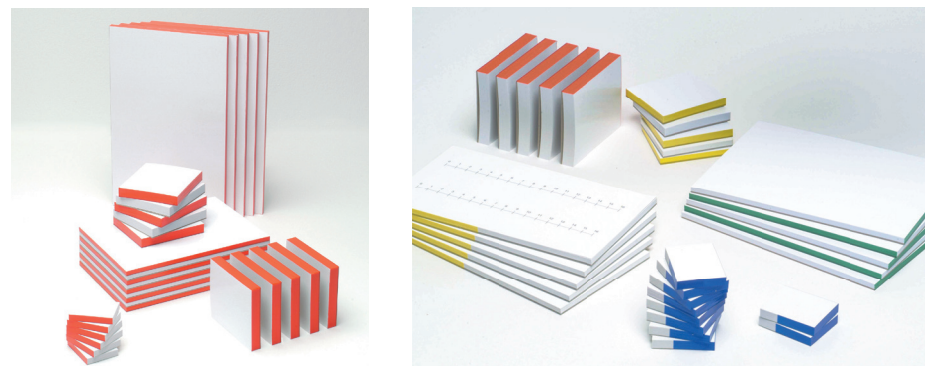

Glossar over almindeligt anvendte symboler på MGK medicinsk udstyr's emballage og mærkater i overensstemmelse med EU's standard for medicinsk udstyr
DIN EN ISO 15223-1:2022-02

	Læs brugsanvisningen	REF	Katalog- eller modelnummer
	Må ikke genbruges	LOT	Batchkode
	Ikke-steril	MD	Medicinsk udstyr
	Må ikke udsættes for sollys	UDI	Unik udstyrsidentifikationskode
	Opbevares tørt		Antal blokke
	Anvendes inden		Antal ark
	Temperaturområde for opbevaring	CE	CE-overensstemmelsesmærkning
	Producent		

*Litteratur: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene¹ - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>

²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011