

TRIOS 3

Rengøring og desinfektion af MOVE, håndstykke, spidser, scannerlinse & kalibrerings sæt.

Denne vejledning beskriver, hvordan de forskellige dele på TRIOS 3 MOVE rengøres. Det er vigtigt at skelne mellem rengøring af scannerspidser, scannerens overflader og kalibreringsudstyret.

Rengøring af scannerspids

Under scanningen bliver spejlet kontamineret – anvend udenatureret alkohol (ethanol eller propanol) til at aftørre spejlet. Kan bestilles på apoteket som M-Sprit eller U-Sprit 70 %.



Anvend ikke overfladedesinfektion. Tør spejlet straks med en blød, fnugfri klud. Lad ikke ethanolen fordampe fra spejlet.

VIGTIGT: Scannerspiden må ikke autoklaveres umiddelbart efter brug af ethanol. Rengør den først med opvaskemiddel i lunkent vand. Ellers kan ethanolen brænde fast på spejlet.

Scannerspiden rengøres manuelt med et mildt opvaskemiddel, gerne YES, vand og en blød, fnugfri klud. En blød børste kan anvendes til plastdelene.

Rengør ikke scannerspiden i en vaskedesinfektor, da spejlet beskadiges. Skyl og tør grundigt med en blød, fnugfri klud. Spejlet er et optisk instrument, som er meget følsomt over for ridser, hvilket kan forringe scannerens ydeevne.

Scannerspiden er beregnet til ca. 150 autoklaveringer.

Autoklaving: Scannerspiden skal være rengjort, skyllet, tør og pakket i en lukket, lufttæt sterilpose, inden den autoklaveres ved 121 °C eller 134 °C.

Rengøring af beskyttelsesspids

Beskyttelsesspiden må kun overfladedesinficeres. Den tåler **IKKE** hverken vaskedesinfektor eller autoklav.



Rengøring af scannerens overflader (display, håndstykke osv.):

Aftørres med overfladedesinfektion, 60–70 % ethylalkohol, isopropanol eller ethanol. Spray ikke direkte på skærmen, men anvend en let fugtet, blød og fnugfri klud. Skærmen er ikke fugttæt, så det anbefales at tørre den efter med en tør, blød og fnugfri klud.

Rengøring af scannerlinse

Desinficeras med odenaturerad etanol och det är viktigt att direkt torka torrt med en mjuk tork så att inte etanolen får självdunsta från linsen. Detta kan orsaka en hinna på skannerlinsen som försämrar skannerresultatet. Linsen är ett optiskt instrument som är mycket känslig för repor. Vidrör aldrig linsen med fingrarna.

När handstycket har ytdesinficerats ska skyddsspetsen sättas på.

3D kalibreringssæt

Kan om nødvendigt aftørres udvendigt med denatureret alkohol. Absolut ikke på indersiden. Blæs om nødvendigt indersiden ren med tør trykluft.



Farve kalibreringssæt

OBS! Kalibreringsfladerne på farvekalibreringsmålet (med side A og B) må ikke berøres eller komme i kontakt med væsker. Rengøres kun med tør trykluft efter behov.

Farvekalibreringsadapteren (grå adapter) kan rengøres i hånden og desinficeres/steriliseres i autoklave efter behov.

Farvekalibreringssættet har en udløbsdato, som fremgår af bagsiden. Når udløbsdatoen er passeret, skal der bestilles et nyt farvekalibreringssæt hos Unident Danmark, Scannersupport, tlf. 7021 1626.

OBS! Den grå adapter skal altid udskiftes samtidig med farvekalibreringssættet, og den gamle adapter skal kasseres. De to dele fremstilles samtidig og er designet til at passe præcist sammen.



* **Bløde kluder** kan bestilles fra Unident Danmark med varenummer: **7020 Curi Med**. 100 stk/pk.

Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse med 3Shapes anbefalinger og garantibetingelser.



UNIDENT®

We back you up