

3M™ Clinpro™ Clear
fluoridbehandling

Fluorid. Forenklet.

Introduktion af
næste generations
fluoridbehandling.




3M™ Clinpro™ Clear
fluoridbehandling

Dine patienter fortjener bedre.


I en klinisk evaluering foretrak patienter og tandlæger 3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling frem for fluoridbehandling med gel og kolofoniumbaseret lakbehandling.

Patientvurderinger:

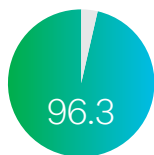

Udseende på tænderne


Patienter vurderede 3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling til **96,3 ud af 100 for udseende på deres tænder.**

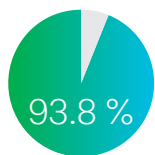

Jævn og glat fornemmelse i munden

93,8 % af patienterne vurderede at Clinpro Clear fluoridbehandling gav en **jævn og glat fornemmelse i munden.**


Vurdering fra tandplejere:

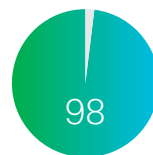

Vurdering af patientoplevelse


Tandplejere vurderede deres patienters **opfattelse af deres oplevelse** med Clinpro Clear fluoridbehandling til **98 ud af 100.**

1 time efter behandling:

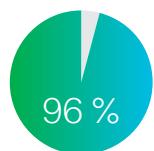

Fornemmelse

96 % af patienterne kunne ikke mærke Clinpro Clear fluoridbehandling på tænderne, sammenlignet med 8 % for Colgate® PreviDent® 5 % Sodium Fluoride Varnish.

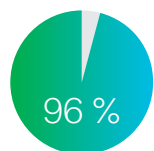

Smag

96 % af patienterne kunne ikke smage Clinpro Clear fluoridbehandling, sammenlignet med 67 % for Colgate® PreviDent® 5 % Sodium Fluoride Varnish.

Nem og hurtig applicering.

Det unikke L-Pop leveringssystem giver også en forbedret professionel oplevelse.

- Den gennemsnitlige score for brugervenlighed for Clinpro Clear fluoridbehandling var 97,2 ud af 100
- I en klinisk undersøgelse sagde 100 % af tandplejerne, at de fleste brugere hurtigt ville lære at bruge Clinpro Clear fluoridbehandling

Bare tryk...
og du er klar.




En fluoridbehandling, der gør mere med mindre.

Baseret på feedback fra patienter og dentale behandlere har vi nytænkt den traditionelle fluoridbehandling. 3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling har en ny vandbaseret sammensætning, der er klar til påføring og muliggør effektiv fluoridoptagelse. Kortere ventetid før patienten må spise eller drikke efter behandling med Clinpro Clear fluoridbehandling gør det nemt for dine patienter at sige "ja".

-  Klar, vandbaseret sammensætning i en hurtig og nem L-Pop unit-dose
-  Sammensætningen er fri for kolofonium og almindelige allergener* og har en neutral pH-værdi
-  Stabiliseret calciumfosfat
-  Minimum kontakttid på kun 15 minutter
-  Forbedret smag, lugt og fornemmelse i munden
-  Sammensætning der er skånsom mod sugeledningen

**Se oplysninger om allergener på 3Mdanmark.dk/ClinproClear

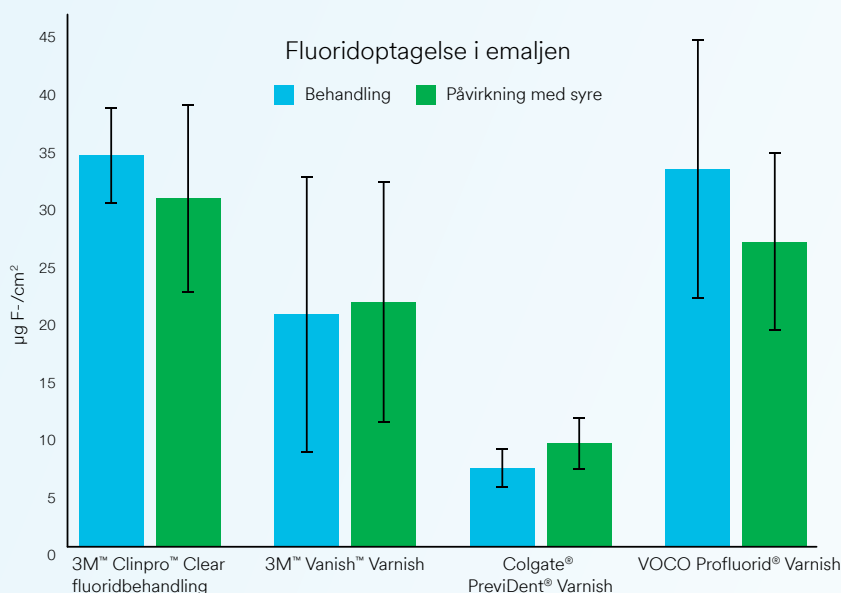

3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling er en 2,1 % natriumfluoridopløsning med opløselige fluoridioner, der umiddelbart appliceres på tanden og som giver samme fluoridoptagelse som en traditionel 5 % lak.

Efter behandling og efter syrepåvirkning er emaljefluoridoptagelsen (EFU) af 3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling statistisk set ikke forskellig fra de testede produkter.

Kilde: Interne data

Bestillingsinformation

3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling

Varenummer Produktinformation



7300FF
7300M
7300W

3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling, 50 stk.

Pakning med 50 stk. unit-dose (0,50 ml L-Pop)

Uden smag

Smag af mint

Smag af vandmelon



7310FF
7310M
7310W

3M™ Clinpro™ Clear fluoridbehandling, 100 stk.

Pakning med 100 stk. unit-dose (0,50 ml L-Pop)

Uden smag

Smag af mint

Smag af vandmelon

Læs mere på

3Mdanmark.dk/ClinproClear



Solventum

Kay Fiskers Plads 10
2300 København S.

©Solventum 2024. Solventum, S logoet, og Clinpro er varemærker tilhørende Solventum eller dets datterselskaber. 3M og 3M logoet er varemærker tilhørende 3M. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.