


FLEXIBLE SCALER

FLEXIBLE SCALER Art. 268

Beskrivelse

Meget tynd rustfri stålstrimmel med mange perforeringer. Kanterne på perforeringerne er meget skarpe og fungerer som fine scalerer til at fjerne interproximal tandsten, misfarvninger og rester af resincement efter bonding af porcelænsrestaureringer.

Garanterer ekstrem nøjagtighed i perforeringerne.

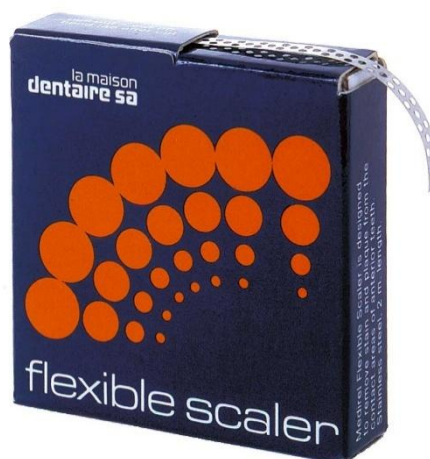

Anvendelse

Afskær den længde af strimlen, som der er brug for. Indsæt strimlen i incisal- eller okklusalembrasuren og arbejd den facialt og lingualt for at fjerne den generende aflejring. Ved fjernelse af resincement, er det klogt at flytte strimlen fra porcelæn til tand, i hvert fald i starten. Vær forsigtig med ikke at skære i gingiva eller læberne, da kanterne er ret skarpe. Vær også forsigtig med at bruge den på rodooverflader, hvor for aggressiv håndtering kan fjerne for store mængder cementum. Vi anbefaler ikke at bruge den på komposit.

Sterilisering

Kan steriliseres ved hjælp af enhver metode og derefter genbruges eller bortskaffes efter hver brug.

Emballage

Rulle i en selvdispenserende æske. Meget kompakt og uden spild.
Rustfrit stål. Længde: 2 m.

Brugsanvisning

På siden af æsken. Kort og enkel. Fotografier taget med elektronmikroskop, der viser perforeringernes mikrometriske relief. Takket være denne teknologi renser og polerer Flexibles Scaler uden at beskadige emaljen.

