

## Instruktioner

### DELE TIL DIN BLADEFLASK

INDIKATOR:  
VISER, HVILKEN VEJ SHARP  
SIDE SKAL MØDES.


DENNE SIDE PÅ  
SKALPELHÅNDTAGET  
KALDES ÆG.




### MONTERES PÅ VÆG ELLER BORDPLADE

1. Hvis du ikke har monteret din BladeFLASK, skal du klargøre monteringsbeslaget.\*

A FASTGØRELSESELEMENTET  
HAR TOSIDET TAPE PÅ  
UNDERSIDEN

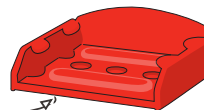


B ELLER BRUG SKRUER.

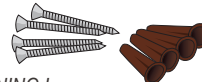

\* SE MONTERINGSVEJLEDNING I  
FASTGØRELSESEMBALLAGE

2. BladeFLASK  
kan monteres  
på væg eller  
bordplade.

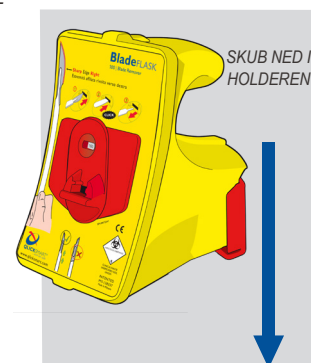


SKUB IND I  
HOLDEREN

BEMÆRK: BLADEFLASK  
SKAL FASTGØRES TIL  
MONTERINGSHOLDEREN  
UNDER BRUG.

### FJERNELSE AF BLADE ENHÅNDSTEKNIK


1. Placer bladet på  
landingspladen  
med den skarpe  
side til højre.  
(æg skal være  
rigtigt)

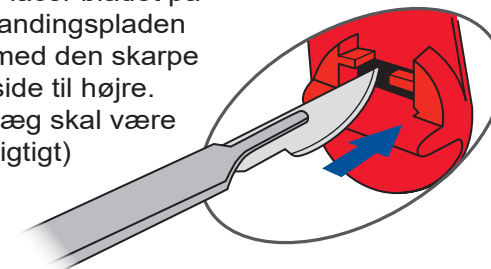

2. Skub  
skalhåndtaget  
ind i BladeFLASK  
indtil et klik høres.



3. Fjern håndtaget.

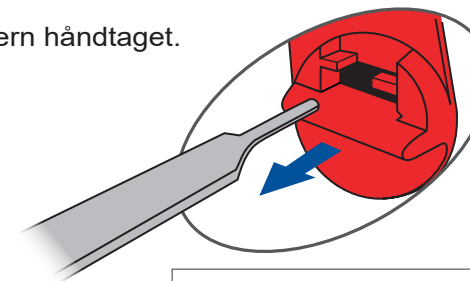

BEMÆRK: BladeFLASK behandles  
som medicinsk affald, når 100  
blade er blevet indsat.