

# Peroxy Ag+

**Desinfektionsmiddel til vandledninger for anordninger til tandlægebrug**

**Produkt til professionel brug**

Brugsanvisning:

Desinficering: I henhold til anordningens brugsanvisning hældes det rene produkt (brintoverilte 3%) i den relevante beholder for desinficering af anordningen. Selvstændig bakteriostatisk beskyttelse af vandforsyningen: Opløs 20 ml produkt for hver liter vand (destilleret) i forsyningsbeholderen for at opnå en opløsning med brintoverilte på 600 ppm.

Sammensætning:

Brintoverilte 3%, sølvioner 0,001% som Ag+, stabilisatorer, vand i passende mængde.

Aktivitet i anordningens vandledninger: Det er påvist, at brintoverilte 3% har en effekt som mikrobaktericid og fungicid ved 10 minutters kontakt. Det er påvist, at opløsningen med 600 ppm har en effekt ved at inhibere mikrobiel vækst i rørledninger.

Advarsler:

Anvendes i henhold til anordningens brugsanvisning til tandlægebrug. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.