

TRIOS 4

Rengøring og desinfektion af MOVE, håndstykke, spidser, scannerlinse & kalibreringssæt.

Denne vejledning beskriver, hvordan de forskellige dele på TRIOS 4 MOVE rengøres. Det er vigtigt at skelne mellem rengøring af scannerspidser, scannerens overflader og kalibreringsudstyret.

Rengøring af scannerspids

Under scanningen bliver spejlet kontamineret – anvend udenatureret alkohol (ethanol eller propanol) til at aftørre spejlet. Kan bestilles på apoteket som M-Sprit eller U-Sprit 70 %.

Anvend ikke overfladedesinfektion. Tør spejlet straks efter med en blød, fnugfri klud. Lad ikke ethanolen fordampe fra spejlet.

VIGTIGT: Scannerspiden må ikke autoklaveres umiddelbart efter brug af ethanol. Rengør den først med opvaskemiddel i lunkent vand. Ellers kan ethanolen brænde fast på spejlet.

Rengør scannerspiden manuelt med et mildt opvaskemiddel, gerne YES, vand og en blød, fnugfri klud. En blød børste kan anvendes til plastdelene.

Rengør ikke scannerspiden i en vaskedesinfektor, da dette beskadiger spejlet og kontaktfladerne i spidsen.

Skyl og tør grundigt med en blød, fnugfri klud. Spejlet er et optisk instrument, som er meget følsomt over for ridser, hvilket kan forringe scannerens ydeevne.

Scannerspiden er beregnet til ca. 100 autoklaveringer.

Autoklaving: Scannerspiden skal være rengjort, skyllet, tør og pakket i en lukket, lufttæt sterilpose, inden den autoklaveres ved 121 °C eller 134 °C.

Rengøring af beskyttelsesspids

Beskyttelsesspiden må kun overfladedesinficeres. Den tåler **IKKE** hverken vaskedesinfektor eller autoklav.



Rengøring af scannerens overflader

(display, håndstykke osv.):

Aftørres med overfladedesinfektion, 60–70 % ethylalkohol, isopropanol eller ethanol. Spray ikke direkte på skærmen, men anvend en let fugtet, blød klud. Skærmen er ikke fugttæt, så tør den efter med en tør, blød og fnugfri klud.

Rengøring af scannerlinse

Glaslinsen under scannerspidsen desinficeres med udenatureret 70 % ethanol. Det er vigtigt, at linsen straks tørres med en blød, fnugfri klud, så ethanolen ikke fordamper fra linsen. Ellers kan der dannes en belægning på scannerlinsen, som forringer scannerens ydeevne. Linsen er et optisk instrument og er meget følsom over for ridser. Rør aldrig linsen med fingrene.

Når håndstykket er overfladedesinficeret, og linsen er tørret af, skal beskyttelses-spidsen sættes på igen.

Kalibreringssæt

OBS! Kalibreringsfladerne på farvekalibreringsmålet (med side A og B) må ikke berøres eller komme i kontakt med væsker. Rengøres kun med tør luft efter behov.

Farvekalibreringsadapteren kan rengøres i hånden samt desinficeres/steriliseres i autoklave efter behov.

Farvekalibreringssættet har en udløbsdato, som fremgår af bagsiden. Når udløbsdatoen er passeret, skal der bestilles et nyt farvekalibreringssæt hos Unident Danmark, Scannersupport, tlf. 7021 1626.

OBS! Adapteren skal altid udskiftes samtidig med farvekalibreringssættet, og den gamle adapter skal kasseres. De to dele fremstilles samtidig og er designet med en særlig pasform, så de passer præcist sammen.



* **Bløde kluder** kan bestilles fra Unident Danmark med varenummer: **7020 Curi Med**. 100 stk/pk.



Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse med 3Shapes anbefalinger og garantibetingelser.